

Gebruiksaanwijzing

Clean 'n Easy Interieur

Beoogd gebruik:


Reinigen van niet-invasieve medisch hulpmiddelen en andere harde oppervlakken in o.a. zorginstellingen, verpleegtehuizen, bejaardentehuizen etcetera.

Hoe te gebruiken:

1. Was uw handen,
2. Trek handschoenen aan (voor hygiënische redenen) *
3. Open de doseerschuiif op de deksel van de emmer en trek er een reinigingsdoek uit,
4. Sluit de doseerschuiif op de deksel van de emmer goed,
5. Reinig het oppervlak met de kant-en-klare reinigingsdoek, als de doek te droog wordt dient er een nieuwe doek uit de emmer gepakt te worden,
6. Gooi de gebruikte doeken weg in een afvalbak,
7. Trek uw handschoenen uit en gooi deze weg in de afvalbak,
8. Was uw handen.

* trek nieuwe handschoenen aan als u naar een andere ruimte gaat om kruisbesmetting te voorkomen.

Het product is voor single-use gebruik.

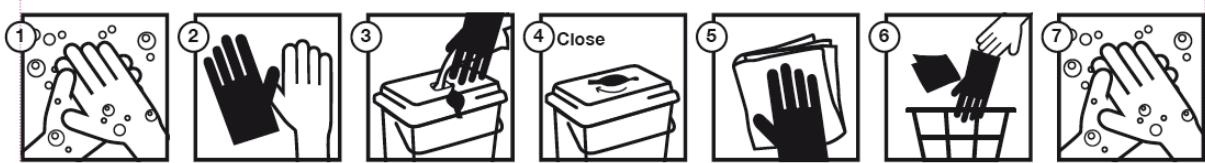

Veiligheid:

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk.
Lees altijd het Veiligheidsinformatieblad

Na inhalering	: Bij overmatig inademen in de frisse lucht brengen.
Na huidcontact	: Afwassen met water.
Na contact met de ogen	: Contactlenzen verwijderen indien aanwezig. Grondig spoelen met stromend water. Raadpleeg een arts indien zich een irritatie ontwikkelt.
Inslikken	: Niet van toepassing

Gebruiksaanwijzing Clean 'n Easy Interieur



Verpakkingen

02036000	Clean 'n Easy Interior doseeremmer	36 x 30cm	(1 x 150 doeken)
02036010	Clean 'n Easy Interior navul	36 x 30cm	(3 x 150 doeken)
02036210	Clean 'n Easy Interieur Doseeremmer	18 x 30cm	(1 x 300 doeken)
02036220	Clean 'n Easy Interieur navul	18 x 30cm	(1 x 300 doeken)
02036580	Clean 'n Easy Interieur in doseerbus	12 x 15cm	(6 x 125 doeken)
02036590	Clean 'n Easy Interieur navul	12 x 15cm	(12 x 125 doeken)

Bewaartemperatuur : 5-30°C
Houdbaarheid : zie label